


HIV-Test

Exacto®

Empfohlen durch:

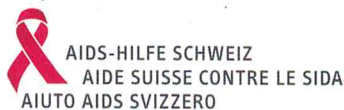

Das erworbene Immundefizienz-Syndrom (AIDS)

Bei AIDS handelt es sich um ein erworbenes Immundefizienzsyndrom, das gekennzeichnet ist von einer Zerstörung und Desorganisation der Zellen des Immunsystems durch das humane Immundefizienz-Virus (HIV 1 oder 2), was zu einer schweren Immunschwäche führt (AIDS-Stadium). Aufgrund der Immundefizienz ist eine Person anfälliger für die sogenannten «opportunistischen» Krankheiten: Erkrankte Personen sterben häufig als Folge dieser Krankheiten.

Drei Übertragungsarten von HIV wurden nachgewiesen:

- Sexuelle Kontakte: Hauptgrund für eine Ansteckung;
- Über Blut: betrifft insbesondere Konsumenten von injizierbaren Drogen und medizinisches Fachpersonal;
- In Utero (letzte Schwangerschaftswochen): bei der Geburt, beim Stillen.

Symptome: Unspezifisch für AIDS, treten zyklisch auf, ohne Persistenz, was eine Diagnose erschwert.

- +/- 15 Tage nach Ansteckung: Fieber, Hauteruptionen, Müdigkeit, Durchfall, dann verschwinden diese Anzeichen;
- Einige Monate bis einige Jahre nach Ansteckung (nach einer langen Phase ohne sichtbare Anzeichen): Neuerliches Auftreten der Symptome, die von der Immundefizienz zeugen.

Warum testen?

Bedeutung des diagnostischen Tests

In der Schweiz leben rund 20'000 Menschen mit HIV. Man geht jedoch von einer Dunkelziffer von 10% aus. Ohne Behandlung und Vorbeugung sind genau diese 10%, die unwissend mit dem Virus leben, für einen Grossteil der Neuinfektionen verantwortlich. Diese Unkenntnis ist gefährlich und begünstigt die Verbreitung des Virus, was die Sterblichkeit erhöht.

Der Selbsttest verfügt über eine Erkennungsstrategie, um die Kommunikation im Zusammenhang mit AIDS in Richtung der Ziele «90,-90,-90» zu verbessern: ein Projekt der UNO, wonach im Jahr 2020 90% der betroffenen Personen behandelt werden, 90% erkannt und 90% geschützt sind.

Der EXACTO® HIV-Test bietet eine neue Form der Erkennung in Form eines **Selbsttests** auf Anfrage des Patienten, der über seine Seropositivität nicht Bescheid weiss; der Test liefert in **weniger als 30 Minuten** ein sehr wichtiges, anonymes und sehr zuverlässiges Ergebnis. Der Test beruht auf einer Reaktion der Antigene (GP36 und GP41) des Tests mit den HIV-Antikörpern des Patienten. Ziel ist eine Betreuung und der Beginn einer Behandlung, um die Virenbelastung, das Übertragungsrisiko und daher das Risiko von Neuinfektionen zu verringern.

ANMERKUNG: Für ein zuverlässiges Ergebnis muss der Test 3 Monate nach der Risikosituation durchgeführt werden, während ein Labortest innerhalb von 6 Wochen gemacht werden kann.

Leistungen und Eigenschaften des Tests:

- Zuverlässigkeit **99,9%**
- Einfache Anwendung (einfache Entnahme eines 5 µL Blutropfens)
- Schnelles Ergebnis: **innerhalb von 10 Minuten**
- Produkt: **Kennzeichnung CE 0086**

Anwendung:

- Eine Stoppuhr vorbereiten
- Hände mit heissem Wasser waschen (für eine bessere Durchblutung der Fingerspitzen)



Entnahme eines Blutropfens
 >> Identifizierung der Antikörper
 anti HIV-1 und anti HIV-2
 (bilden sich im Fall einer AIDS-Infektion).

NACH DURCHFÜHRUNG DES TESTS FINGER VERBINDEN
 >> 10 MINUTEN WARTEN, BEVOR MAN DIE ERGEBNISSE ABLEIST,
 NICHT LÄNGER ALS 20 MINUTEN WARTEN

Auswertung der Ergebnisse



MÖGLICHE SERONEGATIVITÄT

Keine Bestätigung der Seronegativität, wenn ein Risikofall während der vergangenen 3 Monate vor Durchführung des HIV-Diagnose-Selbsttests erfolgt ist.



MÖGLICHE SEROPOSITIVITÄT

- Test durch ein Laboratorium bestätigen lassen.
- Einen Arzt oder ein Testzentrum aufsuchen: CeGIDD (Zentrum für kostenlose Information, Tests und Diagnose von Infektionen durch einen humanen Immundefizienz-Virus (HIV), Virushepatitis und sexuell übertragbare Infektionen (STI)).
- Geschützter Geschlechtsverkehr während des Wartens auf die Bestätigung der Ergebnisse.



Ratschläge für den Apotheker

Test in der Nähe der Verhütungsmittel auslegen, AIDS-Vorbeugung durch geschützten Verkehr bewerben.

Sehen Sie sich unser youtube-Video an:
<https://www.youtube.com/watch?v=ThzGuUB5bLw>



Verpackung der Tests/Schachtel	1	2
Betroffene Personen		
CODE EAN	3532678588599	3532678588605
Pharmacode	7492905	7492911
Ref.	115296	115297
Haltbarkeit	24 Monate	24 Monate

Beipackzettel aufmerksam lesen.